

# **StrabRehab C (Android)**

V02.02.000 / 03.06.2019

Petr Novák (Ing., Ph.D.) novakpe@fel.cvut.cz


## Obsah

1	Úvod .....	1
2	Popis aplikace .....	1
3	Stručný popis úloh .....	2
4	Historie verzí .....	3

## 1 Úvod

Do Aplikace se nezadávají žádné přístupové údaje. Platnost aplikace je omezena pouze její vlastní činností.

## 2 Popis aplikace

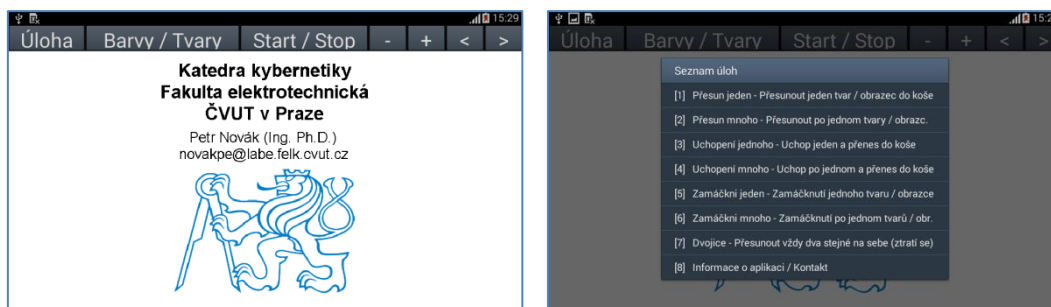

**Úloha** – Výběr úlohy (zobrazení seznamu dostupných úloh).

**Barvy / Tvary** – Zda se zobrazují obrazce odlišné barvou nebo i tvarem.

**Start / Stop** – Spuštění a zastavení úlohy.

- / + - Zmenšení / zvětšení velikosti obrazců.

< / > – Pomaleji / rychleji pohyb obrazců po ploše (pouze pro úlohy kde se obrazce pohybují).

V aplikaci jsou dostupné tyto úlohy:

**Přesun jeden** - Přesunout jeden tvar / obrazec do koše

**Přesun mnoho** - Přesunout po jednom tvaru / obrazce do koše

**Uchopení jednoho** - Uchop jeden a přenes do koše

**Uchopení mnoho** - Uchop po jednom a přenes do koše

**Zamáčkni jeden** - Zamáčknutí jednoho tvaru / obrazce

**Zamáčkni mnoho** - Zamáčknutí po jednom tvarů / obrazců


**Dvojice** - Přesunout vždy dva stejné na sebe (ztratí se)

Informace o aplikaci / Kontakt

### 3 Stručný popis úloh


**Přesun jeden – Přesunout jeden tvar / obrazec do koše.** – Prostým podržením prstu na obrazci a posunem / přetažením jej přemístit na barvu (pravá strana) odpovídající tomuto obrazci. Vždy ten co je právě zobrazen.

**Přesun mnoho – Přesunout po jednom tvary / obrazce.** – Jako v předchozím případě, ale jeden po druhém.

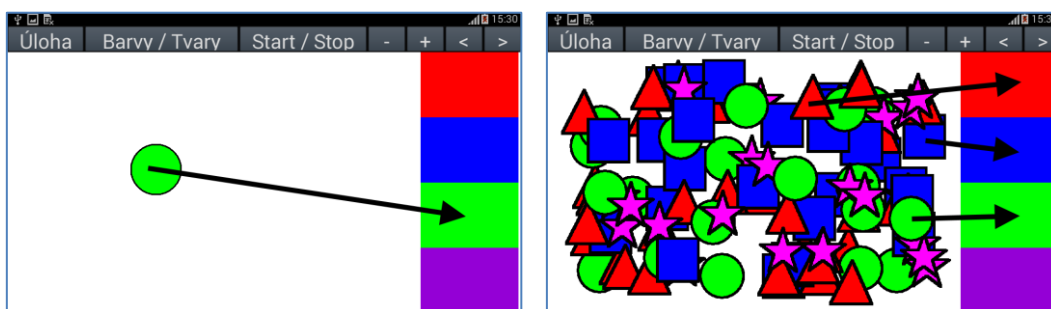


**Uchopení jednoho – Uchopit jeden a přenést do koše.** – Obrazec je nutno dostatečně zvětšit, aby jej bylo možno uchopit pomocí dvou prstů (téměř u sebe). Při správném uchopení se obrazec černě orámuje a lze jej přesunout na odpovídající barvu. Po celou dobu přesunu je nutno jej držet oběma prsty.

**Uchopení mnoho – Uchopit po jednom a přenést do koše.** – Jako předchozí, ale jeden obrazec po druhém.

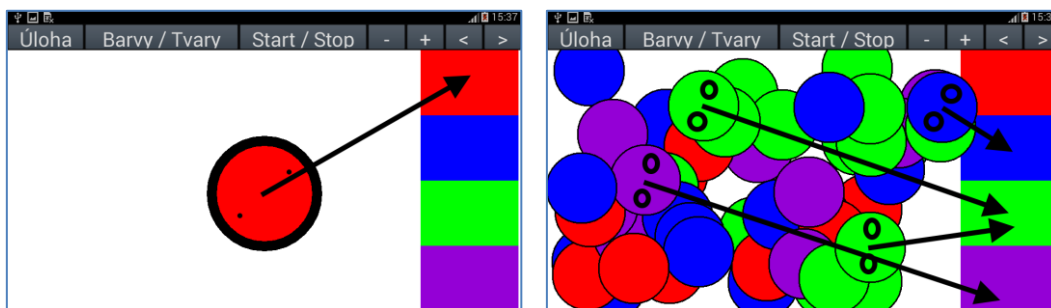


**Zamáčkni jeden – Zamáčknutí jednoho tvaru / obrazce.** – Pohybující se obrazec je nutno prstem zamáčknout. Zamáčknutý obrazec zmizí a zobrazí se další na náhodném místě.

**Zamáčkni mnoho – Zamáčknutí po jednom tvaru / obr.** – Pohybující se obrazce je nutno postupně zamáčknout. Zamáčknutý obrazec zmizí.

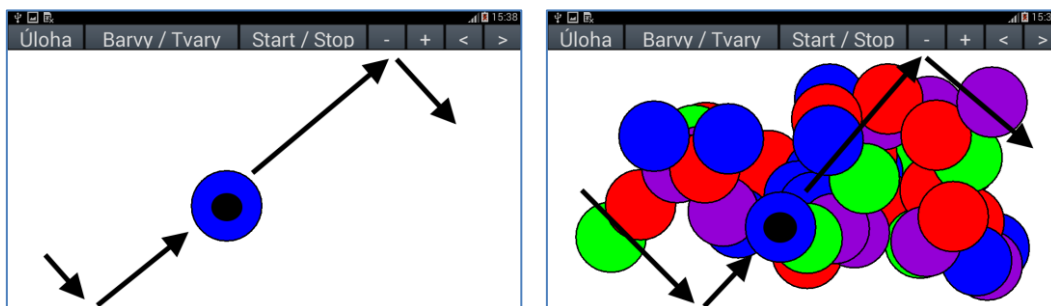

**Dvojice – Přesunout vždy dva stejné na sebe (ztratí se)** – Úkolem je dát na sebe (přes sebe) dva obrazce stejné barvy. Při správném umístění dvou stejně barevných obrazců oba obrazce zmizí.

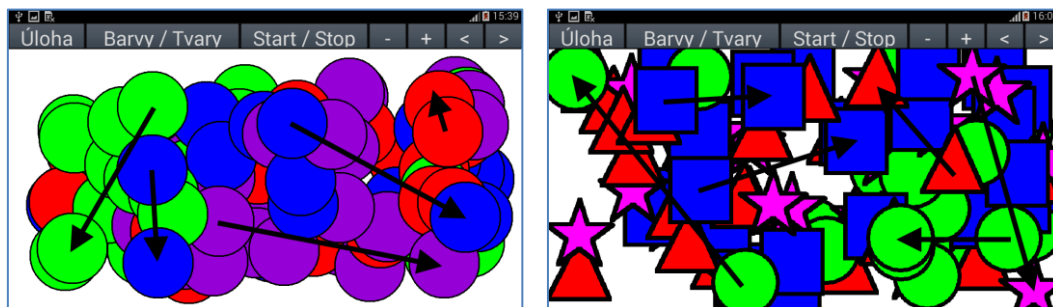

## 4 Historie verzí

Poznámky:

- Datum je uváděn ve tvaru „ROK-MĚSÍC-DEN“ (častěji) nebo „DEN-MĚSÍC-ROK“ (méně častěji). Tedy měsíc je vždy uprostřed (pro jednoznačnost). Číslice pro den a měsíc jsou vždy zarovnané na dvě platná / zobrazená místa pro snadnou přehlednost.

**V02.02.000** (2019-06-03) Platnost aplikace do 2021-01-31 (Aplikace nepoužívá přístupové údaje).

- Přidány informace a kontakt do aplikace.

- Drobné úpravy / opravy.

(Na některých tabletech je ikona nějak malá, zatím skutečně nevím proč.)

**V02.01.003** (2018-06-20) Platnost aplikace do 2020-01-31 (Aplikace nepoužívá přístupové údaje).

Drobné úpravy / opravy.

**V02.01.002** (2018-01-18) Platnost do 2018-06-30.

Drobné úpravy / opravy.

(Na některých tabletech je ikona nějak malá, zatím skutečně nevím proč.)

**V02.01.001** (2017-08-21) Platnost do 2017-01-31.

Drobné úpravy / opravy.

(Na některých tabletech je ikona nějak malá, zatím skutečně nevím proč.)

**V02.01.000** (2017-04-24) Platnost do 2017-08-31.

Změna ikony a názvu aplikace (StrabRehab C)

(Na některých tabletech je ikona nějak malá, zatím nevím proč.)

**V02.00.012** (2016-12-13) Platnost do 2017-04-30.

Pouze malé změny / úpravy.

**V02.00.011** (2016-08-25) Platnost do 2016-12-31.

Pouze malé změny / úpravy.

**V02.00.010** (2016-04-25) Platnost do 2016-08-31.

Pouze malé změny / úpravy.

**V02.00.009** (2015-12-30) Platnost do 2016-04-30.

Upraven název aplikace na „AndStrabRehab B“.

**V02.00.008** (2015-09-01) Platnost do 2016-01-01.

**V02.00.007** (2015-05-03) Platnost do 2015-09-01.

**V02.00.006** (2014-12-16) Platnost do 2015-05-01.

**V02.00.006** (2014-08-31) Platnost do 2015-01-01.

**V02.00.004** (2014-04-24) Platnost do 2014-09-01.

V02.00.003 (2014-02-27) Platnost do 2014-06-01.

V02.00.002 (2013-11-26) Platnost do 2014-03-01.

V01.XX.XXX Testovací verze poskytnuta pouze některým pracovištím.