


Obsah

1	Úvod	1
2	Popis aplikace	1
3	Stručný popis úloh	2
4	Historie verzí	3

1 Úvod

Do Aplikace se nezadávají žádné přístupové údaje. Platnost aplikace je omezena pouze její vlastní činností.

2 Popis aplikace

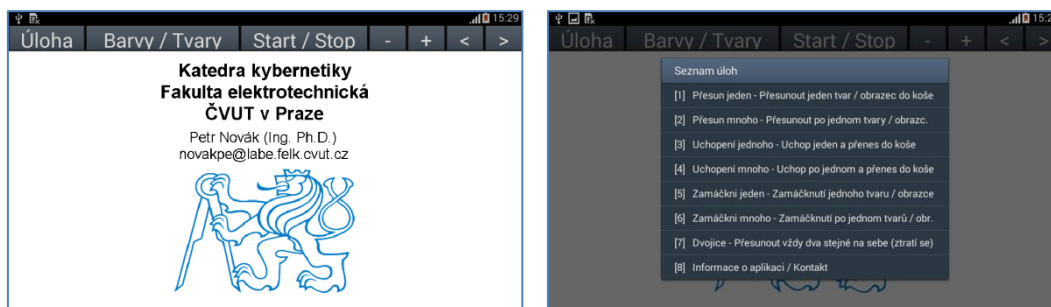

Úloha – Výběr úlohy (zobrazení seznamu dostupných úloh).

Barvy / Tvary – Zda se zobrazují obrazce odlišné barvou nebo i tvarem.

Start / Stop – Spuštění a zastavení úlohy.

- / + - Zmenšení / zvětšení velikosti obrazců.

< / > – Pomaleji / rychleji pohyb obrazců po ploše (pouze pro úlohy kde se obrazce pohybují).

V aplikaci jsou dostupné tyto úlohy:

Přesun jeden - Přesunout jeden tvar / obrazec do koše

Přesun mnoho - Přesunout po jednom tvaru / obrazce do koše

Uchopení jednoho - Uchop jeden a přenes do koše

Uchopení mnoho - Uchop po jednom a přenes do koše

Zamáčkni jeden - Zamáčknutí jednoho tvaru / obrazce

Zamáčkni mnoho - Zamáčknutí po jednom tvarů / obrazců


Dvojice - Přesunout vždy dva stejné na sebe (ztratí se)

Informace o aplikaci / Kontakt

3 Stručný popis úloh


Přesun jeden – Přesunout jeden tvar / obrazec do koše. – Prostým podržením prstu na obrazci a posunem / přetažením jej přemístit na barvu (pravá strana) odpovídající tomuto obrazci. Vždy ten co je právě zobrazen.

Přesun mnoho – Přesunout po jednom tvary / obrazce. – Jako v předchozím případě, ale jeden po druhém.

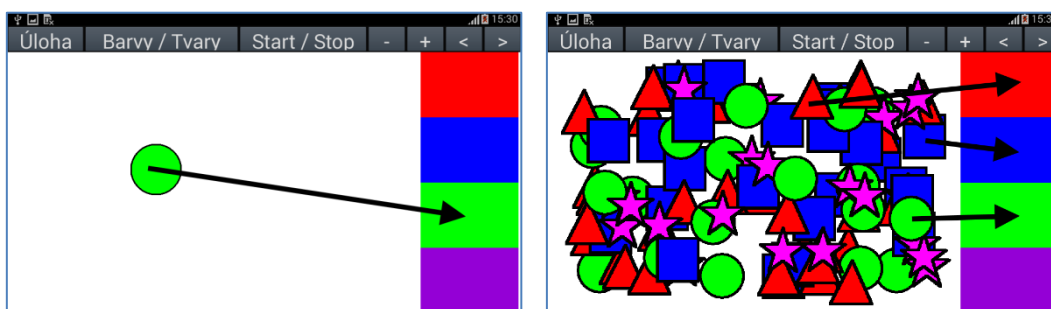


Uchopení jednoho – Uchopit jeden a přenést do koše. – Obrazec je nutno dostatečně zvětšit, aby jej bylo možno uchopit pomocí dvou prstů (téměř u sebe). Při správném uchopení se obrazec černě orámuje a lze jej přesunout na odpovídající barvu. Po celou dobu přesunu je nutno jej držet oběma prsty.

Uchopení mnoho – Uchopit po jednom a přenést do koše. – Jako předchozí, ale jeden obrazec po druhém.

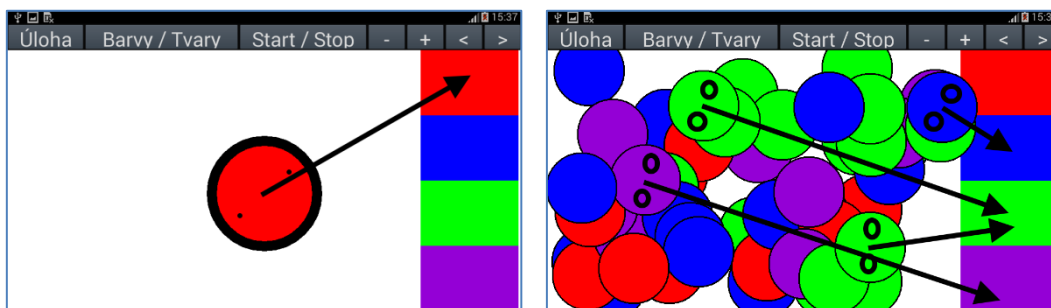


Zamáčkni jeden – Zamáčknutí jednoho tvaru / obrazce. – Pohybující se obrazec je nutno prstem zamáčknout. Zamáčknutý obrazec zmizí a zobrazí se další na náhodném místě.

Zamáčkni mnoho – Zamáčknutí po jednom tvaru / obr. – Pohybující se obrazce je nutno postupně zamáčknout. Zamáčknutý obrazec zmizí.

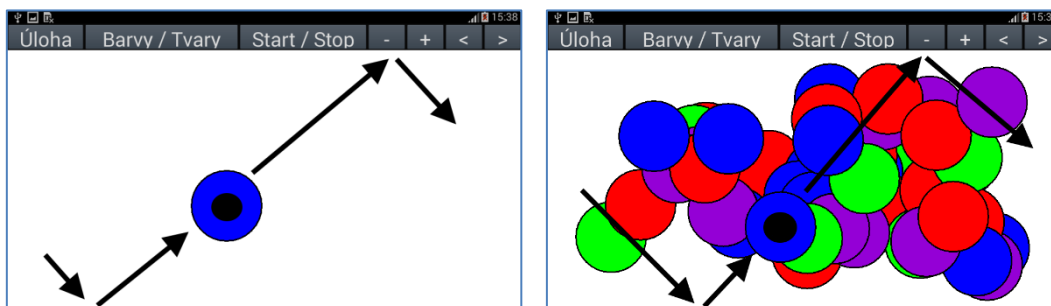

Dvojice – Přesunout vždy dva stejné na sebe (ztratí se) – Úkolem je dát na sebe (přes sebe) dva obrazce stejné barvy. Při správném umístění dvou stejně barevných obrazců oba obrazce zmizí.

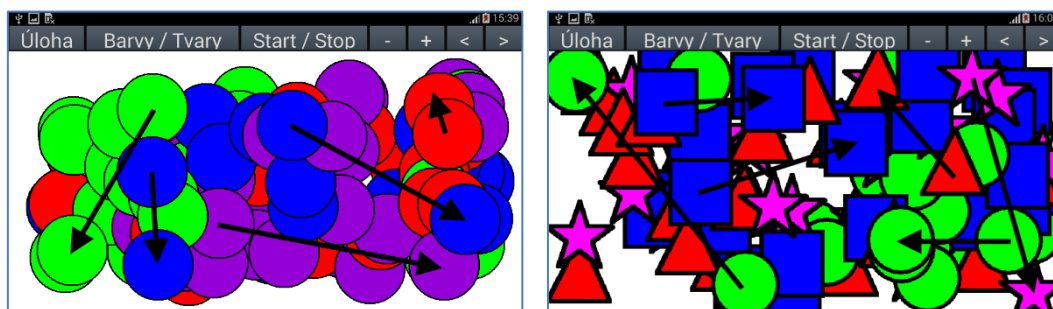

4 Historie verzí

Poznámky:

- Datum je uváděn ve tvaru „ROK-MĚSÍC-DEN“ (častěji) nebo „DEN-MĚSÍC-ROK“ (méně častěji). Tedy měsíc je vždy uprostřed (pro jednoznačnost). Číslice pro den a měsíc jsou vždy zarovnané na dvě platná / zobrazená místa pro snadnou přehlednost.

V02.02.003 (2022-01-13) Platnost aplikace do 2024-01-31 (Aplikace nepoužívá přístupové údaje).

- Minimální opravy / úpravy.

(Na některých tabletech je ikona aplikace velmi malá, zatím skutečně nevím proč.)

V02.02.002 (2021-02-04) Platnost aplikace do 2021-01-31 (Aplikace nepoužívá přístupové údaje).

- Oprava aplikace pro instalaci na různých typech systémů Google/Android.

(Na některých tabletech je ikona aplikace velmi malá, zatím skutečně nevím proč.)

V02.02.001 (2021-01-18) Platnost aplikace do 2021-01-31 (Aplikace nepoužívá přístupové údaje).

- Nová adresa na rozcestník pro aplikaci.

(Na některých tabletech je ikona aplikace velmi malá, zatím skutečně nevím proč.)

V02.02.000 (2019-07-08) Platnost aplikace do 2021-01-31 (Aplikace nepoužívá přístupové údaje).

- Přidány informace a kontakt do aplikace.

- Drobné úpravy / opravy.

(Na některých tabletech je ikona nějak malá, zatím skutečně nevím proč.)

V02.01.003 (2018-06-20) Platnost aplikace do 2020-01-31 (Aplikace nepoužívá přístupové údaje).

Drobné úpravy / opravy.

V02.01.002 (2018-01-18) Platnost do 2018-06-30.

Drobné úpravy / opravy.

(Na některých tabletech je ikona nějak malá, zatím skutečně nevím proč.)

V02.01.001 (2017-08-21) Platnost do 2017-01-31.

Drobné úpravy / opravy.

(Na některých tabletech je ikona nějak malá, zatím skutečně nevím proč.)

V02.01.000 (2017-04-24) Platnost do 2017-08-31.

Změna ikony a názvu aplikace (StrabRehab C)

(Na některých tabletech je ikona nějak malá, zatím nevím proč.)

V02.00.012 (2016-12-13) Platnost do 2017-04-30.

Pouze malé změny / úpravy.

V02.00.011 (2016-08-25) Platnost do 2016-12-31.

Pouze malé změny / úpravy.

V02.00.010 (2016-04-25) Platnost do 2016-08-31.

Pouze malé změny / úpravy.

V02.00.009 (2015-12-30) Platnost do 2016-04-30.

Upraven název aplikace na „AndStrabRehab B“.

V02.00.008 (2015-09-01) Platnost do 2016-01-01.

V02.00.007 (2015-05-03) Platnost do 2015-09-01.

V02.00.006 (2014-12-16) Platnost do 2015-05-01.

V02.00.006 (2014-08-31) Platnost do 2015-01-01.

V02.00.004 (2014-04-24) Platnost do 2014-09-01.

V02.00.003 (2014-02-27) Platnost do 2014-06-01.

V02.00.002 (2013-11-26) Platnost do 2014-03-01.

V01.XX.XXX Testovací verze poskytnuta pouze některým pracovištím.